




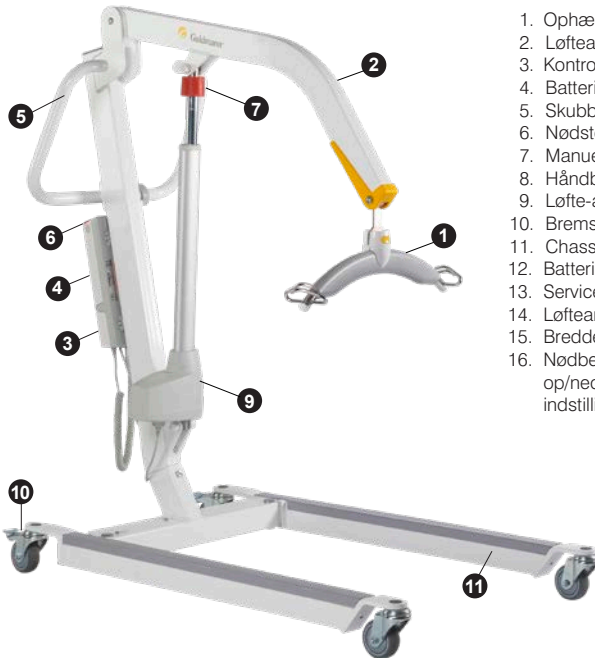

## Quick Guide - GL5.2 mobil personløfter

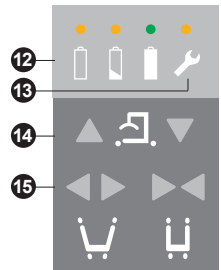

1. Ophængsbøjle
2. Løftearm
3. Kontrolboks
4. Batteri
5. Skubbehåndtag
6. Nødstop
7. Manuel nødфир (option)
8. Håndbetjening
9. Løfte-aktuator
10. Bremse/udløser
11. Chassisben
12. Batteri indikator
13. Service indikator
14. Løftearm - op/ned
15. Breddeindstilling
16. Nødbetjening - op/ned og breddeindstilling

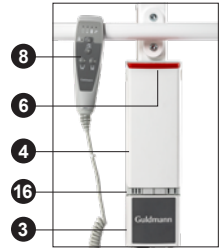

### Tjekliste før brug

- Kontroller at personløfteren kører frit.
- Tjek at bremsefunktionen (10) på hjulene virker.
- Kontroller at løftearmen (2) kan hæves og sænkes ved hjælp af håndbetjeningen (8).
- Tjek at breddeindstillingen (15) kan justeres (åbnes/lukkes) ved hjælp af håndbetjeningen (8).
- Tjek at nødbetjeningsfunktionerne (16) på kontrolboksen (3) virker. Kontroller det manuelle nødфир (7) ved at dreje det i pilens retning .
- Tjek at nødstopknappen virker (6). Du tænder for personløfteren igen ved at dreje nødstopknappen i pilens retning, indtil knappen "springer op".

- Vær opmærksom på at løftebøjlen kan svinge frit (1) og tjek at løftebøjlen er forsvarligt fastgjort til løftearmen (2).




### Opladningsmuligheder

- Integreret oplader i kontrolboks - forbind kabel til stikkontakt.
- Når kablet er forbundet til en tændt stikkontakt, vil den grønne diode på kontrolboksen (3) lyse.
- Den grønne og gule diode på kontrolboksen (3) vil lyse når batteriet oplades. Når batteriet er fuldt opladet vil den gule diode slukke.



## Indikatorlamper og lydsignaler

Status	Indikatorlamper	Lydsignaler	Mulige GL5.2-signaler			
			Op	Ned	Benjustering	Nødfiring
<b>Håndbetjening</b>						
Alt OK	Grøn		x	x	x	x
Lavt batteriniveau	Gul		x	x	x	x
Kritisk lavt batteriniveau	Gul	Bipper ved aktivering af knap	x	x	x	x
Service på personløfter	Lyser konstant under brug samt i 2 minutter efter		x	x	x	x
Overbelastning	Blinker gult 3 gange + lyser i 10 sek			x		x
<b>Kontrolboks</b>						
Oplader	Grøn + gul					
Opladet	Grøn					

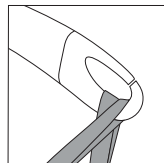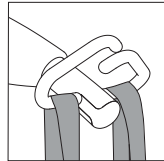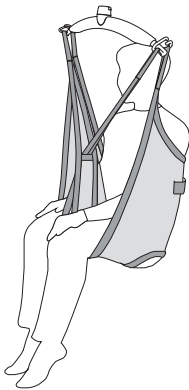

## Tilbehør

### Løftebøjlen

Sejlstropperne placeres i krogene. Ved løft tjek at løftestroppen forbliver i den korrekte position i løftebøjlsens krog.

### Løftesejl

Vi anbefaler at bruge et løftesejl med to eller fire op-hængspunkter. Løftesejlet skal tjekkes før brug - (se løftesejlets brugervejledning). Løftesejlets label skal være intakt og læsbar.

## Daglig rengøring og vedligeholdelse

Rengøring skal foregå med en fugtig klud og almindelige rengøringsmidler. Der må ikke anvendes stærke syrer, baser eller alkohol til rengøring. Se evt. brugermanual.



Scan her for brugermanual m.m. vedrørende brug af GL5.2.

| Time to care |

### Kontakt Guldmann på:

Salg: +45 8741 3100  
salgdk@guldmann.com  
Service: +45 8741 3191  
service@guldmann.com